

Manual de instrucciones

<p>Modelo Horizonte Disponible en: 90 x 190 105 x 190</p>	 A hospital bed with a metal frame and a slatted mattress. The head of the bed is tilted upwards. The bed is shown from a side-on perspective.
<p>Modelo Olimpo Disponible en: 90 x 190 105 x 190</p>	 A hospital bed with a metal frame and a slatted mattress. The bed is shown from a side-on perspective, tilted upwards. It has a headboard and a footboard, and is mounted on casters.
<p>Modelo Oregón Disponible en: 90 x 190</p>	 A hospital bed with a wooden frame and a slatted mattress. The bed is shown from a side-on perspective, tilted upwards. It has a headboard and a footboard, and is mounted on casters.

ESPAÑOL

INDICE DEL MANUAL

1.- DESCRIPCIÓN.....	5
2.- COMPONENTES.....	7
2.1.- COMPONENTES CAMA MODELO HORIZONTE OLIMPO	7
2.2.- COMPONENTES CAMA MODELO OLIMPO.....	8
2.3.- COMPONENTES CAMA MODELO OREGON	9
3.- MONTAJE	10
3.1.- MONTAJE DE LA CAMA GERIÁTRICA.....	10
3.2.- MONTAJE DE ACCESORIOS.....	13
4.- FUNCIONAMIENTO	16
4.1.- ELEVACIÓN DE PLANOS DEL SOMIER (MODELO HOR.)	17
4.2.- ELEVACIÓN-DESCENSO DE PLANOS DEL SOMIER Y DEL CARRO ELEVADOR (MODELOS OLIMPO Y OREGON).....	19
4.3.- ELEVACIÓN-DESCENSO DE BARANDILLAS (MODELO OREGON)	21
4.4.- DESPLAZAMIENTO DE LA CAMA GERIÁTRICA (MODELOS OLIMPO Y OREGON).....	21
5.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	22
5.1.- LIMPIEZA	22
5.2.- MANTENIMIENTO	22
6.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	23
6.1.- CARÁCTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	23
6.2.- PESO Y DIMENSIONES	23

Introducción

Gracias por confiar en nuestros productos. Es conveniente que lea el manual de instrucciones, especialmente los consejos de seguridad y ajustes antes de utilizar el producto. Si tiene alguna duda sobre su utilización, mantenimiento o seguridad, consulte por favor con un distribuidor autorizado de nuestros productos.



IMPORTANTE:

NO UTILICE ESTE PRODUCTO HASTA QUE NO HAYA LEIDO Y ENTENDIDO ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Leyendas y símbolos



Indicaciones de seguridad sobre posibles peligros de accidentes o lesiones para el usuario



Referencia a un documento externo



No se deshaga de este producto junto con la basura doméstica; siga las leyes de reciclaje locales para depositarlo en un lugar adecuado



Uso indicado

- La cama geriátrica 90x190 está especialmente diseñada para su utilización en hospitales, clínicas y otros usos afines, para un uso interior.
- Carga máxima soportada en funcionamiento: 170 kgs
- El peso máximo del usuario es de 135 kgs.
- Este producto está indicado como ayuda técnica para facilitar la vida de las personas con algún tipo de limitación de la movilidad.

1.- DESCRIPCIÓN

La cama consta de cuatro planos articulados con accionamiento eléctrico. Posibilidad de incorporar carro elevador de accionamiento eléctrico y ruedas con frenos independientes. Posibilidad de incorporar patas regulables en altura y otros accesorios como: cabeceros, pieceros y barandillas.

La cama geriátrica no puede ser utilizada o almacenada en el exterior o ambientes húmedos.



No utilice esta cama si la altura, anchura o peso del paciente se encuentra fuera de los límites de uso recomendados. Podrían producirse lesiones al paciente y daños al producto. (Consultar apartado 6.2 Peso y dimensiones de este Manual).

Durabilidad del producto

La vida útil de este producto es como mínimo 5 años; Esta vida se alarga considerablemente y depende del uso adecuado que de él se haga, de un mantenimiento periódico y del seguimiento de las instrucciones y advertencias descritas en este manual en cuanto a uso, limpieza y precauciones de seguridad.

Garantía

Garantizamos nuestros productos por un periodo de dos años, desde la fecha de la factura, ticket de compra o del albarán de entrega. La garantía incluye tanto las piezas a sustituir, como la mano de obra y transporte.


Para que la garantía pueda ser aplicada, el usuario debe presentar el producto junto a la factura de compra como indicativo de la fecha de entrega del producto.

La garantía no cubre los siguientes casos:

- Desgaste normal por el uso, como pilas, ruedas, etc.
- Accidente, como estructuras dobladas, rayones, etc.
- Uso inapropiado, o aquellos daños causados por usuarios con un peso superior al indicado en el manual de usuario.
- Falta de mantenimiento, por no seguir las indicaciones para su conservación detalladas en el manual de usuario.
- Modificaciones o reparaciones hechos por personas no autorizadas.
- Falta de factura .

2.- COMPONENTES


2.1.- COMPONENTES CAMA MODELO HORIZONTE

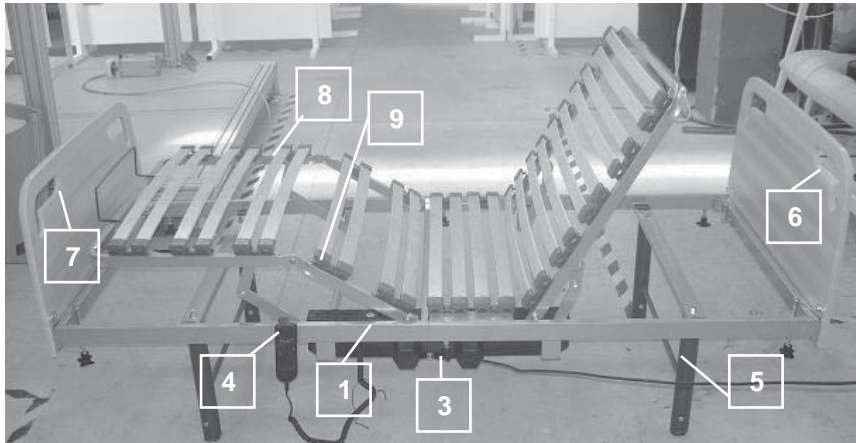

La relación de componentes de la cama es:

Nº	Elementos
	CAMA GERIÁTRICA 90X190
1	Cama somier
3	Motor
4	Mando
5	Patas regulables en altura
6	Cabecero
7	Piecero
8	Lamas
9	Soporte de lamas


2.2.- COMPONENTES CAMA MODELO OLIMPO

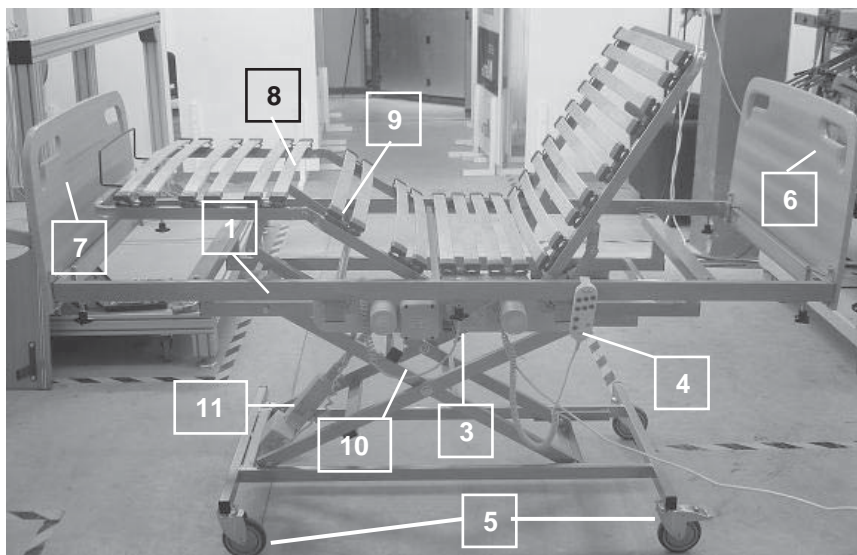

La relación de componentes de la cama es:

Nº	Elementos
	CAMA GERIÁTRICA 90X190
1	Cama somier
3	Motor
4	Mando
5	Kit de ruedas (4 unidades)
6	Cabecero
7	Pieceros
8	Lamas
9	Soporte de lamas
10	Carro elevador frenos independientes
11	Actuador carro elevador

2.3.- COMPONENTES CAMA MODELO OREGON

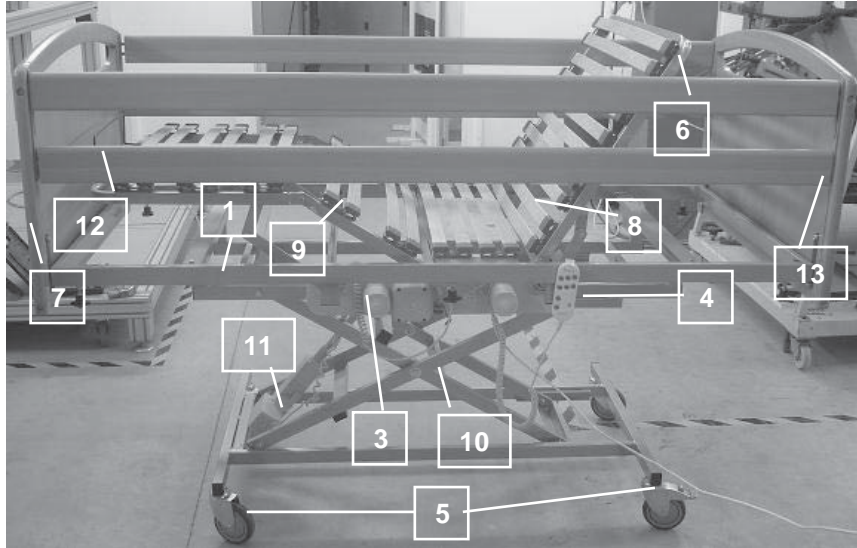

La relación de componentes de la cama es:

Nº	Elementos
	CAMA GERIÁTRICA 90X190
1	Cama somier
3	Motor
4	Mando
5	Kit de ruedas (4 unidades)
6	Cabecero
7	Piecerro
8	Lamas
9	Soporte de lamas
10	Carro elevador frenos independientes
11	Actuador carro elevador
12	Barandilla (unidad)
13	Soporte corredera (unidad)

3.- MONTAJE

3.1.- MONTAJE DE LA CAMA GERIÁTRICA (MODELOS HORIZONTE, OLIMPO Y OREGON)

Para proceder al montaje tenga en cuenta las siguientes consideraciones generales:

La cama geriátrica debe ser montada por personas expertas u formadas.

Durante el montaje se debe asegurar:




- Manejar siempre cuidadosamente los componentes.
- Verificar que los tornillos u otros sistemas de anclaje están bien apretados.
- Protegerse de los riesgos de aplastamientos entre partes de la cama y cabecero/piecero/ barandillas, y del carro elevador.
- Retirar todos los elementos protectores para transporte y embalajes de los componentes antes de poner en funcionamiento la cama y accesorios. Estos elementos pueden ser cinchas, ataduras, abrazaderas, de lo contrario podría dañarse el producto.


MONTAJE DE LA CAMA:

► SI LA CAMA VA MONTADA SOBRE PATAS DE ALTURA REGULABLE (MODELO PUÚZUPVÓ), proceda así:


- Ajuste de la altura de la pata. Deslizar el tubo telescópico hasta hacer coincidir el orificio del tubo interior con el exterior de la pata hasta alcanzar la altura deseada y atornille (L y M). Coloque las patas atornillándolas en los orificios de las barras y apriete con la tuerca (N).

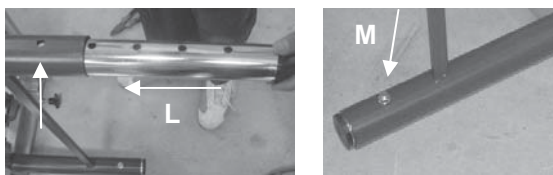

- Coloque las patas atornillándolas en los orificios de las barras y apriete con la tuerca (N).

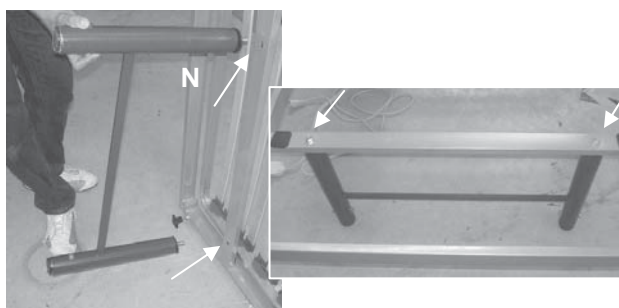

- Sitúe el motor sobre las barras del bastidor (D). Fije el motor a ambas barras deslizando las tapas correderas de las esquinas (E).

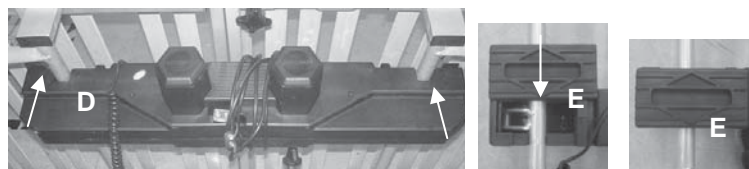


- 4/0
- Conectar el cable eléctrico del motor de la cama a red eléctrica.
 - Colocar el asa de freno para el colchón en los orificios de la barra del somier en la zona de "pies" (O).




► SI LA CAMA VA MONVADA SOBRE CARRO ELEVADOR (MODELOS USQ UUÁAJÜÖÖUP), proceda así:

2. Sitúe el motor sobre las barras del bastidor (D y E). Fije el motor a ambas barras deslizando las tapas correderas de las esquinas (F) y una vez introducida, fíjelas presionando el pasador rojo hacia abajo (G).

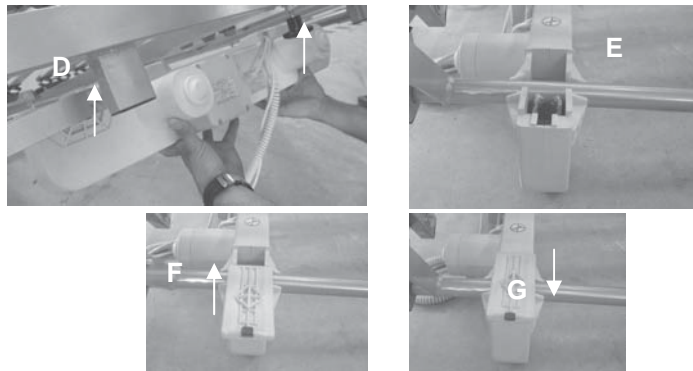


3. Situar el somier sobre el carro elevador frenado (para bloquear ruedas, situar freno en la posición mostrada, H), y enfrente las barras de ambos haciendo coincidir los taladros, inserte los tornillos y apriételos (I).

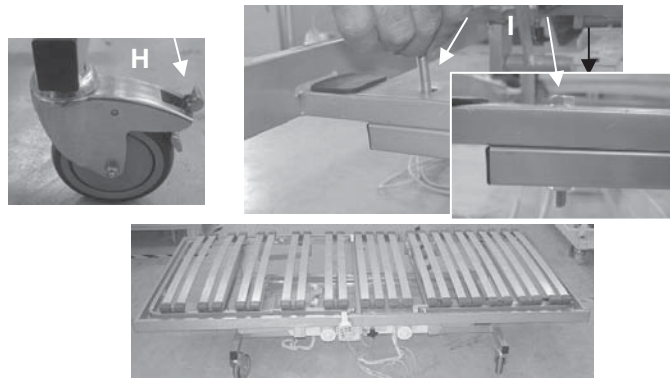

4. Conectar los cables eléctricos del motor de la cama y del carro elevador (J y K).




5. Colocar el asa de freno para el colchón en los orificios de la barra del somier en la zona de "pies" L).

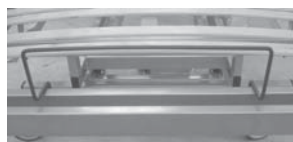

3.2.- MONTAJE DE ACCESORIOS

3.2.1.- Cabecero y piecero Modelos HORIZONTE Y OLIMPO




1. Se montan los anclajes en el piecero (A). Se inserta el piecero en el bastidor de la cama y se aprietan los tornillos (B y C).

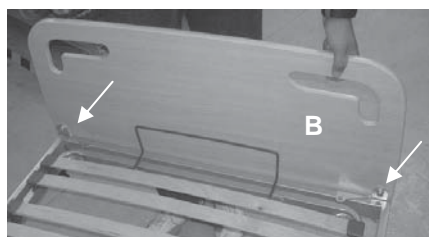

2. Se procede de la misma manera para montar el cabecero.

3.2.2.- Cabecero, piecero y barandilla Modelo OREGON


1. Se montan los anclajes del cabecero en la zona de la cabeza del somier (A). Se une el cabecero a los anclajes mediante tornillos (B). Se fija la unión apretando el botón estriado (C).

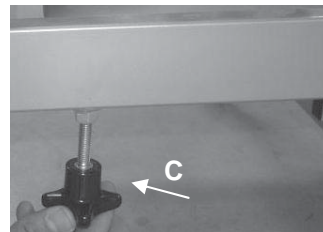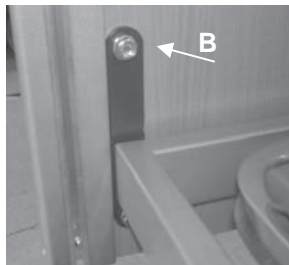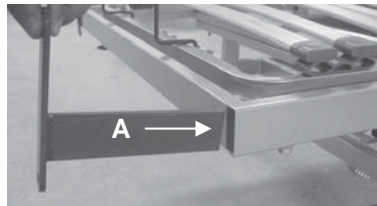


2. Se insertan los soportes correderos con cuatro mechones sobre las guías metálicas del cabecero, para ello presionar el botón inferior del lateral del cabecero para desbloquear la guía y permitir el avance del soporte (D), llevar hasta la parte superior de la guía (E) y bloquear con el botón superior del lateral.



3. Seguidamente se insertan los travesaños de la barandilla en los mechones del cabecero (F), manteniendo el otro extremo del travesaño (lado pies) descansando sobre el suelo.

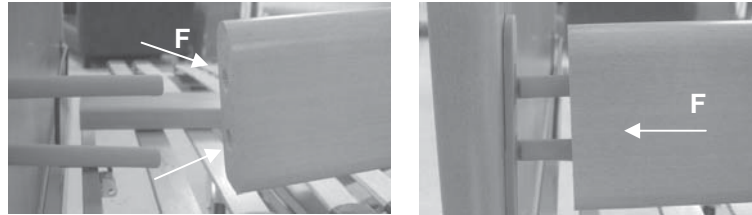

4. Colocar los soportes correderos de cuatro mechones en el extremo del travesaño (lado pies, G) e introducir el soporte en la guía metálica del piecero (H) y deslizar hasta la parte superior de la guía y bloquear con el botón superior lateral (I). Por último, posicionar el travesaño del cabecero (J) Una vez colocadas en posición las barandillas, ajustar el tornillo del piecero (K).

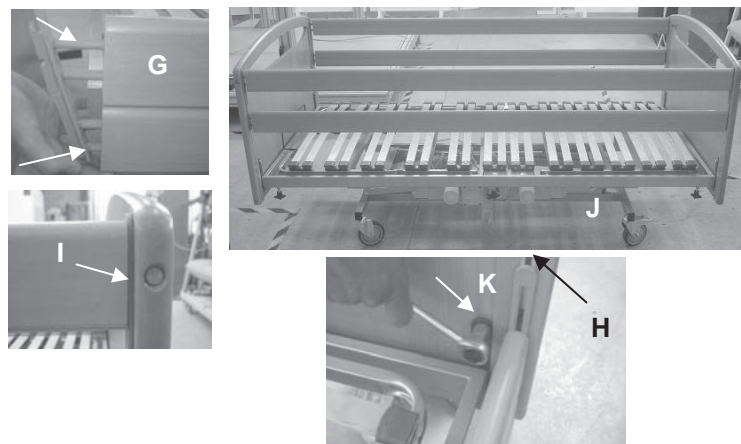

4.- FUNCIONAMIENTO

Antes de poner en funcionamiento la cama lea atentamente estos consejos y advertencias de uso:

La cama geriátrica está diseñada para su uso interior. No utilizar o almacenar en el exterior o ambientes húmedos.

Antes de utilizar la cama, comprobar que se han quitado todos los elementos de embalaje y para el transporte como cinchas, ataduras y abrazaderas, de lo contrario podría dañarse el producto.

No sentarse sobre los planos de elevación de tronco y piernas cuando éstos se encuentren en posición elevada, ni accionarlos cuando se encuentren personas sentadas.



En los movimientos de las partes móviles de la cama y el carro elevador, se debe observar la no presencia de materiales o partes del cuerpo del usuario o de cualquier persona cercana, que puedan interponerse entre el somier, el bastidor de la cama y el carro elevador. En caso contrario pueden suceder aplastamientos al descender estos elementos.


Pueden existir riesgos de aplastamientos entre partes de la cama y cabecero/piecero/ barandillas.

Si se observan anomalías en el funcionamiento de la cama, comprobar que ningún movimiento se halla obstaculizado por material alguno, que las conexiones al motor y a la red eléctrica están en su posición correcta, etc.

Contactar con el distribuidor cuando existan:

- Dudas en el manejo de la cama y accesorios.
- Deformación de cualquier parte de la cama.
- Cualquier anomalía en el funcionamiento de la cama.

4.1.- ELEVACIÓN DE PLANOS DEL SOMIER (MODELOS HORIZONTE Y PLUS)

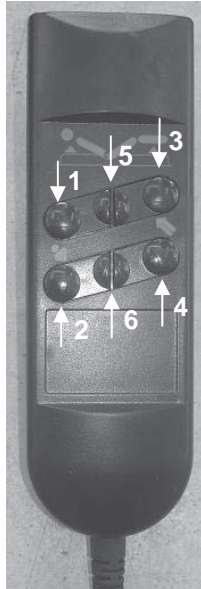

FUNCIONES DEL MANDO:

- 1: Zona del tronco hacia arriba
- 2: Zona tronco hacia abajo
- 3: Zona piernas hacia arriba
- 4: Zona piernas hacia abajo
- 5: Zona tronco y de piernas hacia arriba
- 6: Zona tronco y de piernas hacia abajo

4.1.1.- Elevación-descenso del plano del tronco

- 1. Presionar el botón (1) para elevar el tronco, mantener pulsado hasta alcanzar la inclinación deseada.
- 2. Presionar el botón (2) para bajar el plano, mantener pulsado el botón hasta alcanzar la inclinación deseada.

4.1.2.- Elevación-descenso del plano de las piernas

- 3. Presionar el botón (3) para elevar las piernas, mantener pulsado hasta alcanzar la inclinación deseada.
- 4. Presionar el botón (4) para bajar el plano, mantener pulsado el botón hasta alcanzar la inclinación deseada.

4.1.3.- Elevación-descenso de los planos de tronco y piernas


Si se desea elevar o bajar los planos tanto de tronco como piernas simultáneamente:

- 5. Presionar el botón (5) para elevar los planos de tronco y piernas, mantener pulsado el botón hasta alcanzar la inclinación deseada.
- 6. Presionar el botón (6) para bajar los planos de tronco y piernas, mantener pulsado el botón hasta alcanzar la inclinación deseada.

Advertencia especial: En caso de corte de suministro eléctrico, el motor de la cama dispone de una batería que permite posicionar la cama en posición horizontal. Esta batería es de un solo uso, deberá ser sustituida tras su utilización o si ha transcurrido un largo periodo de tiempo sin usarla (un año).

Para conectar la batería proceda de la siguiente manera:

7. Desconecte el motor de la toma de red eléctrica. Acceda a la zona del motor, y conecte los bornes de la batería (G).

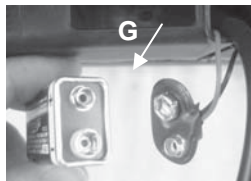

La conexión de la toma de alimentación debe efectuarse a una red eléctrica conforme las normas vigentes y corresponder a una tensión de uso de 230v.


El mando con hilo debe engancharse al panel cabecero cuando no se utilice. El cableado no debe mantenerse en la zona de las piezas móviles de la cama como la cruceta o los planos de elevación.



La batería de reserva no está pensada para el funcionamiento en continuo, sino solamente para un caso de emergencia. Deberá sustituirse tras su uso por una nueva.

Podrían darse interferencias entre la cama y otros equipos eléctricos. Para reducir o eliminar tales interferencias, se debe incrementar la distancia entre la cama y los productos, o bien apagarlos.

4.2.- ELEVACIÓN-DESCENSO DE PLANOS DEL SOMIER Y DEL CARRO ELEVADOR (MODELOS OLIMPO Y OREGON)

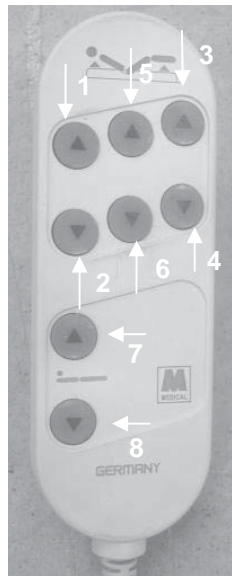

FUNCIONES DEL MANDO:

- 1: Zona del tronco hacia arriba
- 2: Zona tronco hacia abajo
- 3: Zona piernas hacia arriba
- 4: Zona piernas hacia abajo
- 5: Zona tronco y de piernas hacia arriba
- 6: Zona tronco y de piernas hacia abajo
- 7: Carro elevador hacia arriba
- 8: Carro elevador hacia abajo

4.2.1.- Elevación-descenso del plano del tronco

1. Presionar el botón (1) para elevar el tronco, mantener pulsado hasta alcanzar la inclinación deseada.
2. Presionar el botón (2) para bajar el plano, mantener pulsado el botón hasta alcanzar la inclinación deseada.

4.2.2.- Elevación-descenso del plano de las piernas

3. Presionar el botón (3) para elevar las piernas, mantener pulsado hasta alcanzar la inclinación deseada.
4. Presionar el botón (4) para bajar el plano, mantener pulsado el botón hasta alcanzar la inclinación deseada.

4.2.3.- Elevación-descenso de los planos de tronco y piernas

Si se desea elevar o bajar los planos tanto de tronco como piernas simultáneamente:


5. Presionar el botón (5) para elevar los planos de tronco y piernas, mantener pulsado el botón hasta alcanzar la inclinación deseada.
6. Presionar el botón (6) para bajar los planos de tronco y piernas, mantener pulsado el botón hasta alcanzar la inclinación deseada.

4.2.4.- Elevación-descenso del carro elevador

7. Presionar el botón (7) para elevar la altura de la cama con el carro elevador, mantener pulsado hasta alcanzar la altura deseada.
8. Presionar el botón (8) para bajar la cama, mantener pulsado el botón hasta alcanzar la altura deseada.

Advertencia especial: En caso de interrupción de suministro eléctrico, el motor de la cama dispone de una batería que permite posicionar la cama en posición horizontal. Esta batería es de un solo uso, deberá ser sustituida tras su utilización o si ha transcurrido un largo periodo de tiempo sin usarla (un año). Para conectar la batería proceda de la siguiente manera:

9. Desconecte el motor de la toma de red eléctrica. Acceda a la zona del motor, y conecte los bornes de la batería (G).

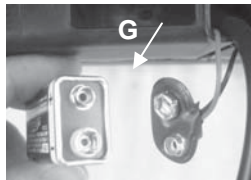

La conexión de la toma de alimentación debe efectuarse a una red eléctrica conforme las normas vigentes y corresponder a una tensión de uso de 230v.

El mando con hilo debe engancharse al panel cabecero cuando no se utilice. El cableado no debe mantenerse en la zona de las piezas móviles de la cama tales como la cruceta o los planos de elevación.




La batería de reserva no está pensada para el funcionamiento en continuo, sino solamente para un caso de emergencia. Deberá sustituirse tras su uso por una nueva.

Podrían darse interferencias entre la cama y otros equipos eléctricos. Para reducir o eliminar tales interferencias, se debe incrementar la distancia entre la cama y los productos, o bien apagarlos.

4.3.- ELEVACIÓN-DESCENSO DE BARANDILLAS (MODELO OREGON)


4.3.1.- Elevación de la barandilla

1. Elevar el travesaño superior hasta arriba del cabecero con las dos manos hasta su bloqueo mediante el botón superior del lateral (A). Repetir la misma operación en el piecero.

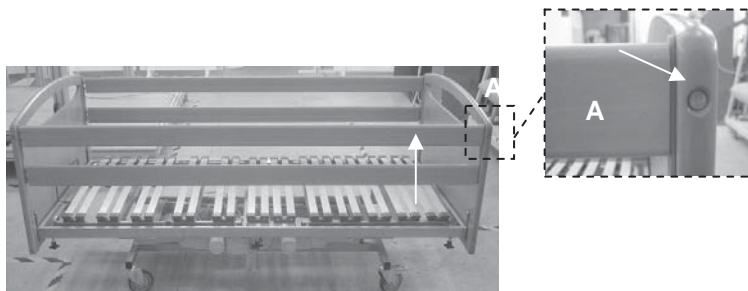

4.3.2.- Descenso de la barandilla

2. Levantar el travesaño superior con una mano, y con la otra presionar sobre el botón superior del lateral del cabecero (A, foto de arriba) y empujar hacia abajo la barandilla (B). Repetir la misma operación en el piecero.

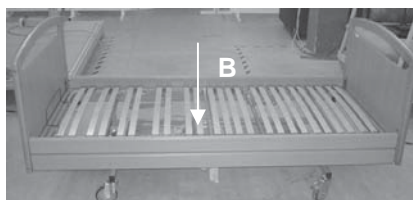


Un posicionamiento incorrecto de la barandilla puede ser perjudicial para la seguridad o provocar un fallo.

4.4.- DESPLAZAMIENTO DE LA CAMA GERIÁTRICA (MODELOS OREGON Y OLIMPO)

La cama geriátrica sobre carro elevador dispone de cuatro ruedas para el desplazamiento, dos de ellas con freno independiente, una situada en la parte trasera y otra en la delantera y cruzada a la anterior (extremo opuesto).

Para proceder al bloqueo-desbloqueo deberá:

1. Para frenar la cama deberá situar la maneta de la rueda en la posición (B). Para desbloquearla posiciónela de nuevo en (A).

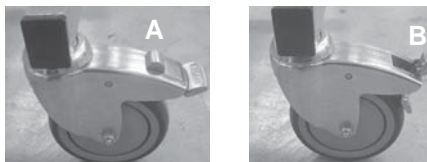

5.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

5.1.- LIMPIEZA

Se recomienda limpiar la cama con agua tibia y con ayuda de una esponja, bayeta o cepillo suave. Se puede usar agua y detergente para la limpieza de piezas metálicas. Seque la cama después de limpiarla.

Antes de la limpieza: Posicionar la cama de manera que facilite la limpieza de los componentes y desconecte el suministro eléctrico.



No utilice líquidos abrasivos, ni cepillos con cerdas duras. No usar vapor para la limpieza, ni sumergirla, puede dañar los componentes.

Antes de una nueva puesta en servicio, todas las piezas deben estar completamente secas.

5.2.- MANTENIMIENTO

Se debe realizar un examen de la cama geriátrica al menos una vez año sobre los elementos relacionados a continuación:

- Conexiones eléctricas.
- Desgaste, cizalladura o deterioro de los cables eléctricos.
- Estado y funcionamiento del mando a distancia.
- Estado y funcionamiento de los planos de elevación del somier.
- Estado y funcionamiento del carro elevador.
- Estado y fijación de las articulaciones.
- Estado de los ensamblajes de la estructura de la cama y del carro elevador.
- Estado de los accesorios (barandillas, etc.), como por ejemplo el funcionamiento del botón de bloqueo/desbloqueo.
- Eficacia de los frenos.
- Rodamiento y rotación de las ruedas.
- Estado del recubrimiento de las piezas metálicas de la estructura, anclajes, etc).

- Estado de la superficie de los panelados como cabecero, piecero, barandillas, etc.).
- Estado de las piezas plásticas (anclajes, etc.).



El mantenimiento de la cama geriátrica no puede ser realizado por personas que no hayan recibido una formación cualificada.

En caso de cualquier duda en el mantenimiento contactar con el distribuidor.

6.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1.- CARÁCTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Los motores de la cama geriátrica y del carro elevador tienen las siguientes características:

- Clase de protección: Clase II.
- Grado de protección contra la penetración de líquidos: IP 20.
- Tensión: 230 V.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Tensión del control remoto: 24 V DC.
- Máximo tiempo de operación continua de 50 VA: ED 15% 2 minutos (para los motores de cama) y ED 10% 6 minutos (motor carro elevador).
- Fuerza máxima: 2x 3500 N / 2 x 4500 N.
- Uso del producto: Interior.

Equipo auxiliar para el descenso de los planos de la cama en caso de corte eléctrico:

- Batería de manganeso de 9 V.

6.2.- PESO Y DIMENSIONES

No utilice esta cama si la altura, anchura o peso del paciente se encuentra fuera de los límites de uso recomendados. Podrían producirse lesiones al paciente y daños al producto:

- Altura del paciente: entre 140 y 190 cm.
- Anchura máxima del paciente: 90 cm:
- Peso máximo del paciente: 135 Kg.

No deberán emplearse con esta cama colchones susceptibles de adaptarse a la articulación del lecho. Existen colchones adecuados que pueden ser suministrados como opción por el fabricante.

Recomendaciones para las medidas y el peso del colchón (cm):

- Anchura: Mínima 80-90 , Máxima 94.
- Longitud del colchón: Mínimo 190, Máximo 194.
- Altura del colchón: Mínimo 13, Máximo 18.
- Peso del colchón: aproximadamente entre 10 y 20 Kg.

Los pesos orientativos de las camas son los siguientes:

MODELO HORIZONTE	
Nombre elemento	Peso elemento (Kg)
CAMA GERIÁTRICA 90X190	30,7
PATAS REGULABLES EN ALTURA	5,0
CABECERO Y PIECERO CON ANCLAJES	
Cabecero	7,2
Piecero	6,7

MODELO OLIMPO	
Nombre elemento	Peso elemento (Kg)
CAMA GERIÁTRICA 90X190	30,7
CARRO ELEVADOR FRENOS INDEPENDIENTES	34,8
CABECERO Y PIECERO CON ANCLAJES	
Cabecero	7,2
Piecero	6,7

MODELO OREGON	
Nombre elemento	Peso elemento (Kg)
CAMA GERIÁTRICA 90X190	30,7
CARRO ELEVADOR FRENOS INDEPENDIENTES	34,8
CABECERO Y PIECERO CON BARANDILLAS MADERA+ ANCLAJES	
Cabecero	8,9
Piecero	8,9
Barandilla	10,0

Las dimensiones orientativas de las camas son los siguientes:

MODELO HORIZONTE					
Elementos		Dimensiones (mm)			
Nombre elemento		Largo	Ancho	Altura	Ángulo
CAMA GERIÁTRICA 90X190		1900	900	173	-
CARRO ELEVADOR FRENOS INDEPENDIENTES		1385	790	mín.=355 máx.=800	-
		Largo	Diámetro	Alturas	Ángulo
PATAS REGULABLES EN ALTURA		720	50,50	h ₀ mín.=363 h ₁ =417 h ₂ =468 h ₃ =521 h ₄ máx.=573	-
		Largo	Ancho	Altura	Ángulo
Cabecero		1016	192	665	-
Piecerero		1016	192	665	-

MODELO OLIMPO					
Elementos		Dimensiones (mm)			
Nombre elemento		Largo	Ancho	Altura	Ángulo
CAMA GERIÁTRICA 90X190		1900	900	173	-
CARRO ELEVADOR FRENOS INDEPENDIENTES		1385	790	mín.=355 máx.=800	-
CABECERO Y PIECERO CON ANCLAJES					-
Cabecero		1016	192	665	-
Piecerero		1016	192	665	-

MODELO OREGON					
Elementos		Dimensiones (mm)			
Nombre elemento		Largo	Ancho	Altura	Ángulo
CAMA GERIÁTRICA 90X190		1900	900	173	-
CARRO ELEVADOR FRENOS INDEPENDIENTES		1385	790	mín.=355 máx.=800	-
CABECERO Y PIECERO CON BARANDILLAS MADERA+ ANCLAJES					-
Cabecero		1016	192	665	-
Piecero		1016	192	665	-
Barandilla	BAMA1	1940	28	h travesaño= 90 H máxima elevada = 300 (siendo 150 la altura del colchón)	-
Distancia entre los largueros de la barandilla (mm)		-	-	86,72	-

Temperatura y humedad de almacenaje

Temperatura de almacenaje: Min: -40°C Max: 65°C

Humedad de almacenaje: Min:5% Max: 95%

Desecho

El símbolo que se indica abajo significa que, conforme a las leyes y regulaciones locales, su producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo al punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida y reciclado de un producto desechado ayuda a preservar los recursos naturales y protege el medioambiente. Conforme a las recomendaciones mencionadas, antes de desechar el producto, deberá comprobar la propiedad legal del mismo.

